



Skyddsvisir

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Produktbeskrivning

Produktnamn: Original tryckeri Skyddsvisir

Produktbeskrivning: Engångs skyddsvisir för medicinskt bruk

Artikelnummer: 323

Denna skyddsutrustning är testad och certifierad av anmält organ 0161

Aitex - ASOCIACION DE INVESTIGACION DE LA INDUSTRIA TEXTIL
Plaza Emilio Sala 1
03801 ALCOY (ALICANTE)
Spain

Produkten är märkt med: CE
COVID-19
AITEK 25DAT116

Denna märkning refererar till det faktum att produkten har certifierats enligt metoden 25DAT116 som utvecklats av ovan anmälda organ. Denna har tagits fram i enlighet med EU kommissionens rekommendation (EU) 2020/403 som utgivits för att underlätta framtagandet av PPE som skydd mot Covid-19.

Produkten är CE märkt som PPE enligt förordning (EU) 2016/425.

Här finns EG försäkran för nedladdning: <http://originaltryck.se/skyddsvisir>

Avsedd användning

Produkten är avsedd att användas vid provtagning och arbete med patienter/brukare i hälso-och sjukvården och som skydd mot droppsmitta.

Produktgaranti

Detta skydd är avsedd att brukas en gång och efter användning sorteras och kastas enligt de lokala gällande återvinnings reglerna.

Produktbegränsningar



WARNING!!

Skadad eller repat visir måste bytas ut.

Bruksanvisning

Allmänt



Denna produkt får endast brukas enligt de angivels-
er som framgår i denna
bruksanvisning.

Syfte

Syftet med denna bruksanvisning är att man ska få förståelse om hur denna utrust-
ning ska användas samt bli varskodd om de eventuella risker som finns.

Grundläggande krav

För att man ska få nyttja och använda denna utrustning måste man ha läst och
förstått denna bruksanvisning.

Bruksanvisningen ska finnas tillgänglig för alla användare av produkten.

Tillverkarens uppgifter

Tillverkare:

Original Tryckeri Norrland AB

Besöksadress:

Spårvägen 10, 901 31 Umeå Sverige

Hemsida:

originaltryck.se

Email:

lennie@originaltryck.se

Telefon:

090-205 79 40


Användningsbeskrivning

Monteringsanvisning

Så här monterar man ihop och använder man skyddsvisiret:


Steg 1:

Ta visiret ur sin förpackning och lossa på dess kordborrsband. (se bild till höger).

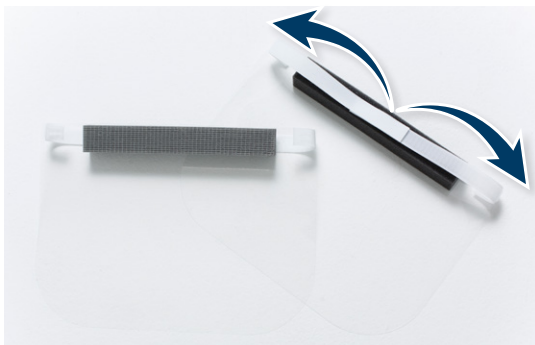


Steg 2:

För sedan visirets skumgummi anhåll mot pannloben. (se bild till höger).

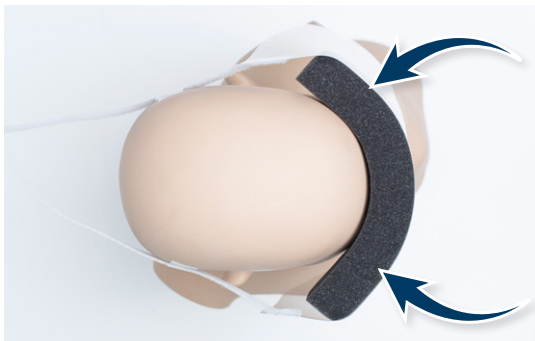

Steg 3:

För därefter ihop kordborrbanden. Säkerställ att de är ordentligt sammanfogade. (se bild till höger).

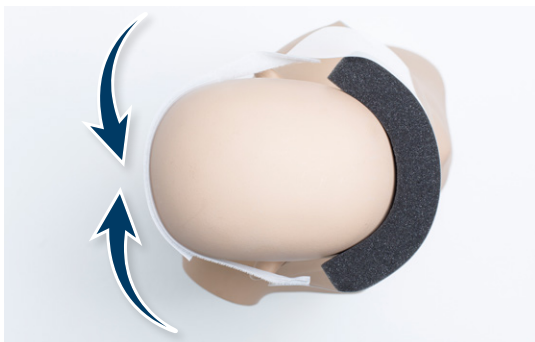


Steg 4:



OBS!! Kontrollera att Original tryckeri skyddsvisir sitter korrekt innan arbete får påbörjas.

Bilderna till höger visar hur en korrekt applicering av visiret ser ut.

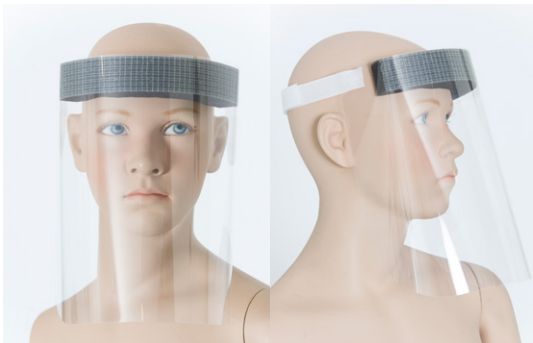


Steg 5:

För att ta av visiret utan att riskera att få smitta på händerna.

Lossa kardborrbanden och ta försiktigt av visiret. (se bild till höger).

Därefter följ de sedvanliga renlighetsrutinerna som att tvätta och/eller desinficera händerna noggrant efteråt.

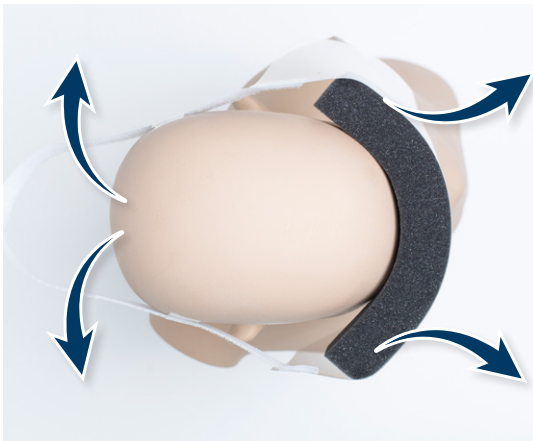

Skötsel och underhållsanvisning



OBS!!

Original tryckeri skyddsvisir 323 är inte avsedd att återanvändas.

Förpackningsbeskrivning

Original tryckeri skyddsvisir levereras förpackade i kartong, 50st per förpackning alternativt 40st per förpackning. Bilden till höger visar ett exempel på hur denna förpackning kan se ut.



Förpackningsbeskrivning

- Förvara visiren bör så att risk för yttre åverkan undviks
- Undvik utsätta visiren för långvarig kontakt med solljus.

Reservdelar och tillbehör

Original tryckeri skyddsvisir levereras komplett som förbrukningsartikel utan några reservdelar.

Återvinning

När väl visiret är förbrukad tas den av enligt tidigare monteringsbeskrivning. Visiret källsorteras enligt de gällande lokala återvinningsregler som hårdplastavfall.

Övrigt

Original Tryckeri Norrland AB vill passa på att få tacka för att just ni har valt att köpa vår produkt och vi är stolta över att vi kan bidra till en säkrare värld.

Original
tryckeri

Original Tryckeri Norrland AB
Spårvägen 10, 901 31 Umeå, Sweden
+46 (0)90-205 79 40
lennie@originaltryck.se