

## Visir Hellberg paket SAFE 3 PC medical

Säljs endast i paket om 24st. Kombination av SAFE 3 bärare och polykarbonatvisir medical. Systemet följer standarden EN 166:2002-04.

SAFE 3-bäraren kan användas som en fristående visirbärare eller tillsammans med Hellbergs nackbygel hörselskydd. Den robusta pannan skyddar mot slag och stötar, har låg vikt, är bekvämt och justerbart för att passa olika huvudstorlekar. Pannan är utformad för att ge användaren ett bra skydd och hög komfort.

- Kompatibel med alla Hellberg-visir.
- Bekvämt med enkelt justerbar rem.
- Enkelt att lyfta visiret och det håller sig stadigt på plats i stand by-positionen.

### Approval Info

EN standards approval: CE EN 166:2001 / CE EN 166:2002-04 (gäller tillsammans med Hellberg visirblad)

Eye and faceprotection markings: B / F

ANSI approval: ANSI Z87+

Environmental approvals: ROHS, REACH

SAFE PC medical visirblad av polykarbonat är lämpligt för skydd mot stänk.

Typ/Material: Klar polykarbonat

Tjocklek: 0,75 mm

Längd: 200 mm

### Approval Info

EN standards approval: CE EN 166:2002-04

Environmental approvals: ROHS, REACH

### UNDERHÅLL / RENGÖRING

Visiret och visirhållaren skall rengöras efter varje användning. Visiret kan rengöras manuellt med alkohol/ytsprit alternativt med en mild tvållösning. För undvikande av repor på visiret skall en mjuk trasa användas.

VIKTIGT. Vid rengöring av enheten skall visir och hållare separeras. Efter rengöring, låt delarna torka väl innan hopsättning.

Visiret skall bytas så snart det uppvisar repor eller försämrad optisk kvalitet.

### FÖRVARING/HÅLLBARHET

Förvara visiret på en torr och ren plats och utsätt det inte för direkt solljus.

Förvara det helst i originalförpackningen.

[Länk till information från Socialstyrelsen "Till dig som arbetar inom vård och omsorg – covid-19"](#)

[Länk till Arbetsmiljöverket Personlig skyddsutrustning som skydd mot covid-19](#)

[Länk till Folkhälsomyndigheten med information till personal inom vård och omsorg](#)



|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| <b>Standard / klassning</b> | CE      |
|                             | EN 166  |
|                             | EN 1731 |